

# Injecteren met NovoPen® 5



**1** Haal de pendop van de pen en draai de patroonhouder eraf. Controleer de naam en kleur van de patroon voor de soort insuline. Plaats de patroon in de patroonhouder met als eerste het schroefdraaduiteinde. Draai de patroonhouder weer op de pen. Neem een nieuwe naald en verwijder het papieren afdekplaatje. Druk de naald recht op de pen en draai deze vast.



**2** Controleer altijd de insulinetoevoer voordat u injecteert. Trek de toedieningsknop uit en druk de toedieningsknop in totdat het dosisafleesvenster op '0' staat. De controle van de insulinetoevoer is klaar als u insuline uit de naald ziet spuiten.



**3** Trek de toedieningsknop uit. Zorg ervoor dat het dosisafleesvenster op '0' staat voordat u begint. Draai de toedieningsknop tot de gewenste dosis in het dosisafleesvenster verschijnt.



**4** Steek de naald in de huid op de manier die uw behandelaar u heeft laten zien. Druk de toedieningsknop in totdat het dosisafleesvenster op '0' staat. U kunt een klik horen of voelen. Houd de naald gedurende minimaal 6 seconden in uw huid om ervoor te zorgen dat u de hele dosis toegediend krijgt. Verwijder de naald voorzichtig en gooi de naald op veilige wijze weg. Doe de pendop weer op de pen.



## Hoe controleert u uw laatste dosis?

Om de geheugenfunctie te activeren trekt u de toedieningsknop uit en duwt u deze weer terug. De display toont de gegevens van uw laatste toediening. Na 10 seconden gaat deze uit.



Het getal in de display van de geheugenfunctie laat het aantal eenheden zien dat de laatste keer is geïnjecteerd. De balkjes aan de rand laten zien hoeveel hele uren voorbijgegaan zijn na uw laatste injectie. Als er één heel uur voorbijgegaan is, zal er één balkje verschijnen. Een volgend balkje verschijnt als er weer een heel uur voorbijgegaan is.



Langer dan 1 uur geleden, maar korter dan 2 (één balkje zichtbaar)

10 eenheden geïnjecteerd

**Op [novonordisk.nl](http://novonordisk.nl) kunt u een NovoPen® 5 instructievideo bekijken.**

*Dit is een samenvatting van de belangrijkste stappen uit de gebruikershandleiding. Wij raden u aan voor het gebruik de gehele gebruikershandleiding te lezen.*