

Handleiding verpakken cytologie.



Foto 1: Voor het verzenden cytologisch materiaal zijn nodig:
Gelabelde objectglasjes
Objectglascontainer
Stofvrij zakje (zoals bijv. een gripzakje, sealbag e.d.)
Kartonnen inlay
Luchtkussenenveloppe /easy slider met de door TNT vereiste bedrukking



Foto 2: Breng de gelabelde objectglasjes in de container.

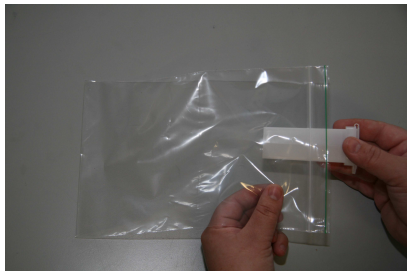


Foto 3: De objectglascontainer wordt geplaatst in gripzakje .



Foto 4: Vouw de kartonnen inlay om het gripzakje.



Foto 5: Plaats de inlay met inhoud en los inzendformulier in de luchtkussenenveloppe of easy slider.

Voor optimale verwerking en beoordeling :
Geen stickers op de objectglasjes plakken.
Geen dekglasjes gebruiken.

Formalinemateriaal altijd in een separate sealbag verpakken!