



TEST-POINT

TEST-POINT IS UW SPECIALIST OP HET
GEBIED VAN THUISTESTEN EN ZORGT
VOOR CONTINUE ONTWIKKELING VAN
NIEUWE TESTEN

INHOUD:

2 MIDSTREAM TESTEN

1 BIJSLUITER



KIJK VOOR DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN OP:
WWW.TEST-POINT.NL



ZWANGERSCHAPSTEST
DUO VERPAKKING

ZWANGERSCHAPSTEST
DUO VERPAKKING

- BEVAT 2 TESTEN
- MEER DAN 99% BETROUWBAAR
- BINNEN 3 MINUTEN RESULTAAT
- GEMAKKELIJK IN GEBRUIK

HEEFT U VRAGEN?
INFO@TEST-POINT.NL

ZODRA DE TEST IS UITGEVOERD, KAN MEN ALLE
GEBRUIKTE SPULLEN WEER TERUGDOEN IN DE LEGE
FOLIEVERPAKKING EN VERVOLGENS IN HET ORIGINELE
DOOSJE. DAARNA WEGDOEN BIJ HET HUISAFVAL.

BIJSLUITER VERSIE: 2009 - 01 V1



TEST-POINT

- Een normale zwangerschap kan niet op basis van hCG waarde worden onderscheiden van een ectopische zwangerschap. Een plotselinge miskraam kan ook leiden tot problemen bij het aflezen van het resultaat.
- Sterilisatie behandelingen, gebaseerd op hCG, kunnen tot valse resultaten leiden. Raadpleeg uw huisarts.

samenstelling, zo ook de vochtigheid in de test omgeving. Deze omgevingsverschillen kunnen ervoor zorgen dat er een roze of paarse achtergrond in het test gebied verschijnt, maar beïnvloeden niet het test resultaat. Zo lang de controle lijn binnen 5 minuten verschijnt, werkt de test goed.

SYMBOOL VERKLARING



HOUD WEG VAN
DIRECT ZONLICHT



BEWAREN BIJ 4-30°C



HOUD DROOG



VOOR EENMALIG
GEBRUIK



VERWACHTE RESULTATEN

Negatieve resultaten worden verwacht bij gezonde niet zwangere vrouwen en mannen. Hoewel de hCG waarden van normale zwangere vrouwen variëren, kan de Test-Point Zwangerschapstest al 1 dag na de eerste gemiste periode een zwangerschap aantonen.

VRAAG & ANTWOORD

- Er is veel verschil tussen de controle lijnen van 2 testen. Is dit een probleem? Nee. Verschil in de controle lijn heeft geen invloed op de testuitslag.
- Kan ik na 5 minuten het resultaat nog aflezen? Nee. De uitslag dient binnen 5 minuten afgelezen te worden. Alhoewel een positieve uitslag een aantal dagen zichtbaar blijft, kan een negatief resultaat veranderen in vals positief na de 5 minuten. Het is aan te raden 5 minuten na het testen het resultaat af te lezen en vervolgens de test weg te gooien, om verwarring te voorkomen.
- Tijdens het testen verscheen een roze kleur in het test gebied, is dit een probleem? Nee. Elk urine monster verschilt in chemische

Distributie

OTC Medical BV
Agro Business Park 10
6708 PW Wageningen



Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
Wondfo Scienteck Park
Guangzhou, P.R. China

Deze test kit bevat 2 complete testen!

BIJSLUITER TEST-POINT ZWANGERSCHAPSTEST

De Test-Point Zwangerschapstest is een snelle zwangerschapstest die eenvoudig is om zelf uit te voeren. Het ontdekt de aanwezigheid van humaan Chorion Gonadotrofine(hCG), dat al in een vroeg stadium van de zwangerschap aanwezig is.

HOE WERKT DE TEST?

Vanaf het begin van de zwangerschap maakt het lichaam het zwangerschapshormoon hCG aan. De hoeveelheid van dit hormoon neemt snel toe in bloed en urine tijdens de zwangerschap. De Test-Point Zwangerschapstest toont de aan- of afwezigheid van het zwangerschapshormoon aan in urine. Dit gaat aan de hand van antilichamen in de test die reageren met dit hormoon.

Wanneer u het urine monster op de test aanbrengt, zal er een reactie plaatsvinden die langs de teststrip omhoog kruipt. Als hCG in het monster het test gebied bereikt zorgt het voor een gekleurde lijn. Afwezigheid van deze lijn betekent een negatief resultaat.

Indien u de test correct heeft uitgevoerd, verschijnt er ter controle een gekleurde lijn in het controle gebied.

INHOUD

1. 2 Zakjes met een midstream test, en een zakje met droogmiddel dat verder niet nodig is voor het uitvoeren van de test.
2. Een bijsluitert.

EXTRA BENODIGDHEDEN

Een klok, wekker of stopwatch en eventueel een schone, droge beker van plastic of glas om de urine in op te vangen.

BELANGRIJK

1. Deze test is uitsluitend geschikt voor extern gebruik. Slik niet door.
2. Na het eerste gebruik wegdoen bij het huisafval. De test is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik.
3. Gebruik de test niet nadat de houdbaarheidsdatum is overschreden.
4. Gebruik de test niet wanneer de verpakking beschadigd of geopend is.
5. Houd buiten bereik van kinderen.

BEWAREN VAN DE TEST


1. Bewaar bij een temperatuur van 4°C tot 30°C in de gesloten verpakking, maximaal tot de houdbaarheidsdatum is overschreden.
2. Bescherm tegen direct zonlicht, vochtigheid en hitte.
3. Vries de test niet in.
4. Open het zakje vlak voor het gebruiken van de test.

WANNEER DE TEST UITVOEREN?

De Test-Point Zwangerschapstest kan uitgevoerd worden met elk urinemonster. Ochtendurine zal echter het meest duidelijke resultaat opleveren, omdat hierin de hoogste concentratie zwangerschapshormoon aanwezig is.

UITVOEREN VAN DE TEST

1. Open het zakje vlak voor het uitvoeren van de test, en haal de test uit het zakje.
2. Houd de ronde achterkant in een hand. Gebruik uw andere hand om het kapje te verwijderen.
3. Laat de test naar beneden wijzen, en plaats het topje tenminste 10 seconden in de urinestraal zodat deze voldoende nat wordt. Zorg ervoor dat er geen urine voorbij het testgedeelte komt.
U kunt er ook voor kiezen om de urine op te vangen in een schone beker en het topje tenminste 3 seconden in de urine te houden.
4. Plaats het dopje weer op het topje van de test en wacht totdat er gekleurde strepen verschijnen. Een positief resultaat kunt u al zien binnen 1 minuut. Bij een negatief resultaat dient u wel 3 minuten te wachten om zeker te zijn dat het resultaat echt negatief is. Lees het resultaat niet meer af na 5 minuten!

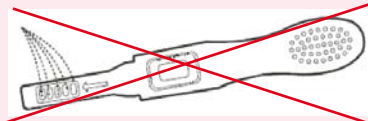

HET AFLEZEN VAN HET RESULTAAT

Negatief (niet zwanger):


Er verschijnt slechts 1 lijn; in het controle gebied. Er verschijnt geen lijn in het test gebied. Dit betekent dat er geen zwangerschap is geconstateerd.

Positief (zwanger):

Er verschijnt een lijn in het controle gebied en in het test gebied. De intensiteit van de lijnen kan verschillen, afhankelijk van het stadium van de zwangerschap. Dit doet niets af aan de uitslag.

Ongeldig:

Er verschijnt helemaal geen lijn, of er is alleen een lijn in het test gebied zichtbaar. Herhaal de test. Wanneer deze ook een ongeldig resultaat geeft dient u naar het verkooppunt te gaan en het lotnummer van de test aan te geven.

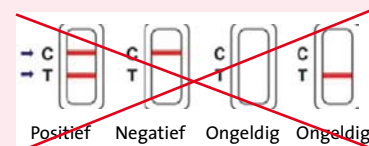

Let op: Wanneer de lijn in het test gebied zwak is raden wij aan de test binnen 48 uur te herhalen.

WAT TE DOEN NA HET RESULTAAT

Bij een positief resultaat (2 lijnen):

Raadpleeg uw huisarts. Hier dient uw zwangerschap bevestigd te worden. Het kan in een uitzonderlijk geval gebeuren dat de test een vals positief resultaat geeft. Zie ook "beperkingen".

Bij een negatief resultaat (1 lijn):

Indien u denkt zwanger te zijn (bv. geen menstruele bloeding), kunt u de test na een paar dagen herhalen. U dient uw huisarts te raadplegen wanneer de test weer negatief is. Zie ook "beperkingen".

BEPERKINGEN

1. Zoals met elke diagnostische procedure moet ook die voor een zwangerschap door een huisarts worden bevestigd.
2. Wanneer de urine niet geconcentreerd genoeg is kan het zijn dat deze niet voldoende hCG bevat. Indien u toch een zwangerschap verwacht dient u 48 uur later een nieuw monster te nemen en de test te herhalen.
3. Een lage concentratie hCG in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap kan tot een negatief resultaat leiden. U dient minstens 48 uur te wachten en de test te herhalen.
4. Verhoogde waarde van hCG in urine kan door enkele andere factoren veroorzaakt worden dan een zwangerschap.