

# Schoonmaken Unit/Stoel

- disposables weggooien (spoelbekertje niet)
- gebruikte instrumenten op vuile tray (terug in korf)
- scherpe instrumenten in plastic insert (Naaldencontainer)
- slangen unit 10 seconden doorspoelen (zonder hoekstuk/in bekertje)
- na bloederige ingreep slangen doorspoelen met koud water en  
Instrumenten afspoelen(bloed verwijderen)
- bekertje weggooien

## Handschoenen vervangen door schone

(handen tussendoor desinfecteren)

- zichtbare verontreiniging huishoudelijk schoonmaken
- desinfecteren ( gebruik minimaal 6 x schoon doekje)
  - 1- arm v.d. lamp en lamp
  - 2- behandelunit (slangen naar je toe afnemen)
  - 3- stoel
  - 4- afzuiging
  - 5- werkblad, toetsenbord en muis, werkstoeltjes
  - 6- spitoon
- handschoenen uit /**HANDEN DESINFECTEREN !**
- schone spullen in kastjes/laatjes terugdoen.

Nooit met handschoenen in kastjes of  
laadjes!!!