

Schoonmaakprotocol SKILLS

Disposables weggoien in gele bak	ja	nee
Gebruikte instrumenten op het verrijdbare kastje(in mandje)		
Scherpe instrumenten in naaldencontainer		
Slangen Unit 10 seconden doorspoelen		
Afzuigslangen doorspoelen met water		
<u>HANDSCHOENEN VERVANGEN!!!!!!!!!!!!!!</u>		
Desinfectie minimaal 6x schoon doekje		
1- Lamp + arm van de lamp		
2- Behandelunit (slangen naar je toe afnemen)		
3- Stoel		
4- Afzuiging (slangen naar je toe afnemen)		
5- Werkblad + stoeltjes		
6- Instrumenten op kastje afnemen en op werkblad Leggen/ daarna in kastje		
Handschoenen uit/ handen desinfecteren		

Nooit met handschoenen in kastjes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Schoonmaakprotocol SKILLS

Nooit met handschoenen in kastjes !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!