

Onze oplossingen voor de behandeling van skin tears

Mepitel® One



Wondcontactlaag met enkelzijdige adhesie

- Fixeert de huidflap
- Kleeft niet in de wond
- Beschermde wond dankzij zachte adhesie
- Minder pijnlijk bij verwijdering dankzij Safetac® technologie
- Kan tot 7 dagen ter plaatse blijven

Mepitel® One

Verpakkingen (steriel)

Art. nr	Afm. (cm)	CNK-code verpakking	Stuks/doos
289100	5 x 7,5	2678-399	10

Verpakkingen (steriel)

Art. nr	Afm. (cm)	Z-indexnr. verpakking	Stuks/doos
289000	5 x 7	15552055	5

Indien uw skin tear een grotere afmeting nodig heeft, neem dan contact op met uw arts.

Mesoft®



Non-woven kompressen en deppers

- Geschikt voor absorptie, reiniging, bescherming, desinfectie en tamponnage
- Hoge absorptiecapaciteit: minstens 50% meer dan gazen
- Zacht materiaal
- Behoudt vorm, zelfs wanneer kompres nat wordt

Mesoft®

Kompressen (steriel) (per 2 of per 5 stuks) (40 gr/m² - 4 lagen)

Art. nr	Afm. (cm)	CNK-code verpakking	Z-indexnr.	Stuks/doos
156065	5 x 5	2336-683	15112012	30 x 5
156165	7,5 x 7,5	2336-717	15111954	30 x 5

Epaderm™ crème



Verzachtende crème

- Bevat geen parabenen, geur- of kleuradditieven
- Verzacht de huid, vermindert jeuk en vermijdt vochtverlies

Epaderm™ crème

Verpakkingen (steriel)

Art. nr	Inhoud	CNK-code verpakking	Z-indexnr.	Stuks/doos
99400823	50 gr	2733-350	15640698	12
99400824	500 gr	2733-723	15640701	6


Legende



Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, België - Tel + 32 (0)3 286 89 50
 Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, 4800 DD - Breda, Nederland - Tel + 31 (0)76 521 96 63
 De naam en het logo Mölnlycke Health Care, Mepitel®, Mesoft® en Epaderm® zijn wereldwijd geregistreerd door Mölnlycke Health Care AB.
 © Auteursrecht (2013) Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden.

Preventie en behandeling van

Skin Tears

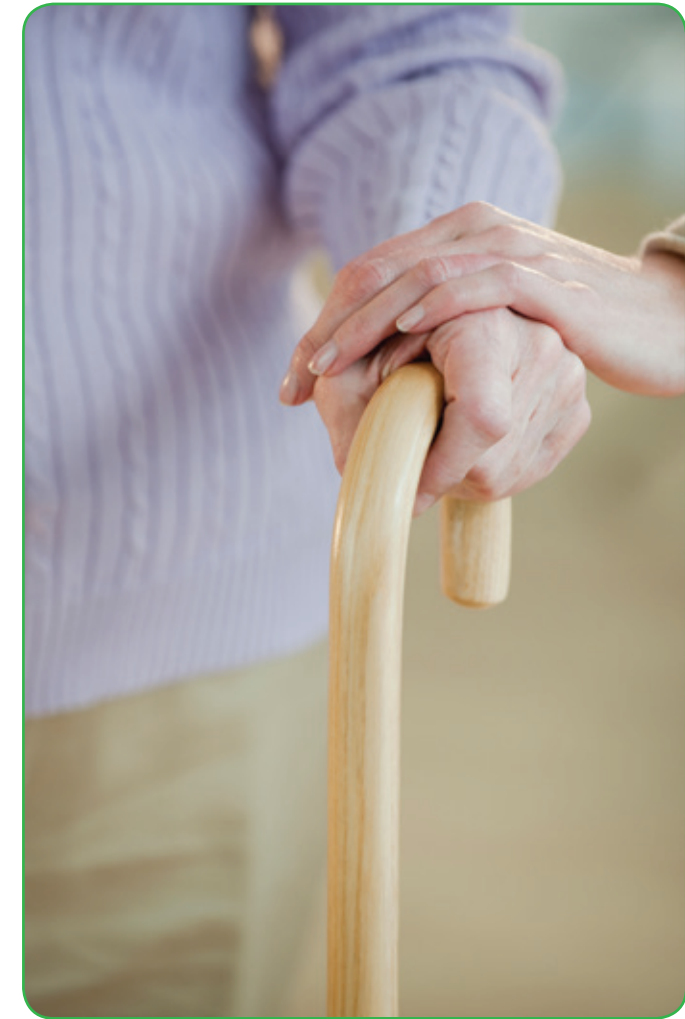

Ontstaan van skin tears

Skin tears of scheurwonden komen meestal voor bij oudere mensen. Zij hebben een broze, perkamentachtige huid doordat de epidermis (de buitenste huidlaag) steeds dunner wordt. Naast hun dunne huid, lopen ze ook meer risico op het ontwikkelen van skin tears door:

- onvoldoende of slechte voeding
- onvoldoende doorbloeding (ischemie)
- verminderde mobiliteit
- medicatiegebruik bv. cortisone

In een klinisch onderzoek - waarbij 88 gevallen van skin tears werden geregistreerd - werden onderstaande meest voorkomende oorzaken voor skin tears gevonden¹:

- 32% veroorzaakt door stoten tegen onrusthekken
- 23% veroorzaakt door in en uit bed stappen
- 21% veroorzaakt door stoten tegen meubels en vallen
- 15% veroorzaakt door verwijderen van kleefpleisters en tijdens bloedafname
- 5% veroorzaakt door fixatie bij verwarde patiënten
- 4% veroorzaakt door aan- en uittrekken van kousen

Preventie van skin tears

Beter voorkomen dan genezen

U bent als patiënt een belangrijke schakel in het beschermen van de huid om skin tears te voorkomen. In deze folder willen we de aandacht vestigen op enkele belangrijke factoren en geven we u tips die u kunnen helpen bij de preventie en het verzorgen van skin tears.

Wat kan u doen?

Veilige omgeving

- zorgen voor voldoende verlichting
- scherpe hoeken van meubilair afschermen
- mogelijke obstakels verwijderen (bv. stoelen)
- eventueel een ergotherapeut inschakelen

Bescherming van de huid

- kleding met lange mouwen
- beenbeschermers
- buisverband of zwachtel
- comfortabele schoenen
- beschermfilm onder kleefpleisters
- beschermende huidolie
- huid droog deppen, niet wrijven

Huidverzorging

- huid beschermen en hydrateren
- vermijd het gebruik van zeep of producten met detergenten bij het wassen

Voeding

- voldoende vochtinname
- gezonde voeding

Overige tips

- geen sieraden
- kortgeknipte nagels

Behandeling van skin tears

Tijdig reageren zorgt voor een snellere en effectieve wondgenezing.

In het geval dat u toch een skin tear ontwikkelt waarbij de huidflap nog volledig of gedeeltelijk aanwezig is, onderneem dan onmiddellijk volgende stappen:

- ① Reinig de wond met lauw kraanwater
- ② Ontsmet de wond indien nodig
- ③ Dep de wond droog
- ④ Leg de huidflap terug d.m.v. een pincet
- ⑤ Fixeer de huidflap met Mepitel® One
- ⑥ Plaats boven Mepitel® One een kompres bv. Mesoft®
- ⑦ Fixeer met een licht compressieve zwachtel

! Belangrijk

- Huidflap niet afknippen
- Laat Mepitel® One minstens 7 dagen ter plaatse
- Vervang kompres bij verzadiging, maar laat Mepitel® One ter plaatse
- Spoel de wond niet tussendoor

Ook belangrijk is de skin tear te controleren op tekenen van infectie. Contacteer uw arts indien u last krijgt van:

- een toename of verandering in pijn
- toenemende roodheid
- zwellingen
- een toename in hoeveelheid en de kleur van het wondvocht
- wondgeur
- een hoge temperatuur



Minder pijn, trauma en stress

Skin tears kunnen pijnlijk zijn, dus het is belangrijk een wondcontactlaag te gebruiken dat de wond beschermt en de omliggende huid niet beschadigt. Mölnlycke Health Care heeft speciale, zachtklevende verbanden met Safetac® technologie, een unieke gepatenteerde adhesietechnologie die vermijdt dat wondverbanden in het wondbed klevan. Hierdoor wordt pijn en weefseltrauma bij verbandwissels geminimaliseerd.

¹ Meuleneire, F., Using a soft silicone-coated net dressing to manage skin tears, Journal of Wound Care, vol 11, n° 10, november 2002.